

V. Precizari:

1. Pentru a economisi bateria, va rugam sa opriti alarma atunci cand nu este folosita.
2. Pentru a evita deteriorarea produsului prin infiltrarea lichidului bateriilor, trebuie sa indepartati bateriile atunci cand nu veti utiliza produsul o perioada de timp mai lunga.
3. Nu fortati (intindeti) prea mult cablul senzorului pentru a evita deteriorarea acestuia.
4. Va rugam sa fiti atenti cu polaritatea bateriei (semnul "+" si "-").

VI. Garantie:

Garantam ca produsul nu are vicii ascunse. Termenul de garantie este de **12 luni** de la data achizitionarii produsului. Pierderea sau manipularea necorespunzatoare a produsului nu este acoperita de garantie.

Costurile pentru livrarea si ridicarea produsului la/de la punctul de service autorizat vor fi suportate de catre client.

Dispozitiv cu alarma pentru tratarea enurezisului nocturn



Manual de utilizare

Va rugam sa cititi cu atentie manualul de instructiuni inainte de a utiliza alarma.

I. Despre alarma

Acest dispozitiv cu alarma este o metoda eficienta si ieftina pentru tratarea enurezisului nocturn, i.e. enurezis, fara folosirea medicamentelor. Proiectat cu caracteristici avansate, alarma enurezis combina melodia, vibratiile sau luminilele multi-led care ajuta sa trezeasca utilizatorul din cel mai adanc somn. Dispozitivul consta dintr-o unitate de alarma conectata la un senzor prin intermediul unui cablu.

Caracteristici:

- Design inteligent. Aparatul dispune de mai multe tipuri de alarma: melodie, vibratii sau lumina multi-led.
- Sensibilitate ridicata si precizie.
- Consum redus de energie.
- Usor de utilizat, un singur buton pentru setarea alarmei.
- Modelul respectiv este conceput pentru copii si adulti.

II. Continutul pachetului

A. Alarma




B. Accesorii de montare



Senzor + cleste

Continutul pachetului FIG.1

III. Instructiuni de folosire:

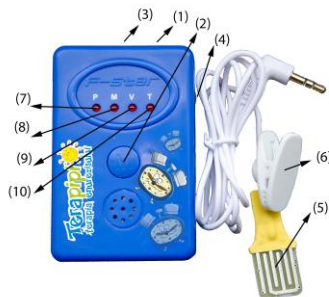

- (1) Comutator alimentare; (2) Buton de selectare a alarmei;
- (3) Comutator selectare melodie; (4) Rotita de control a volumului;
- (5) Detector / Senzor; (6) Cleste; (7) Indicator luminos de alimentare;
- (8) Indicator luminos de melodie; (9) Indicator luminos de vibratii;
- (10) Licarire indicator luminos.

Legenda FIG. 2

1. Pregatiti produsul.

2. Asezati senzorul (5) sub / intre scutec/lenjerie si aproape de locul unde va fi umezit cu usurinta. Apoi, utilizati clestele (6) pentru a prinde de scutec/lenjerie in vederea evitarii caderii senzorului.

3. Impingeti comutatorul de pornire in pozitia "ON" pentru a porni. Asteptati aproximativ 2 secunde, apasati butonul rotund din centrul aparatului "M" de selectare a modului de alarma (2) pentru aproximativ o secunda de fiecare data pentru a selecta modul de alarma dorit.

- Apasati o data pentru comutarea la alarma cu melodie cu indicator luminos pentru melodie (8 – litera M). In acest regim in momentul in care se va umezi senzorul, se va declansa una din cele 2 melodii selectate.

- Apasati de doua ori pentru alarma cu vibratie cu indicator luminos pentru vibratii (9 – litera V). In acest regim aparatul doar va vibra.

- Apasati de trei ori pentru alarma cu lumina cu indicator luminos licarire (10 – litera T). In acest regim ledurile doar vor licari.

4. Cand scutecul/lenjeria este uda/a, alarma se va declansa in functie de modul (regimul) de alarma selectat.

5. Impingeti comutatorul de pornire in pozitia "OFF", apoi schimbati scutecul/lenjeria si stergeti senzorul cu un servetel uscat si absorbant pentru urmatoarea utilizare.

6. Repetati pasii 1 - 4 pentru a seta modul de alarma dorit in cazul unei utilizari repetate.

Completari:

1. Va rugam sa setati modul de alarma dorit in 3 minute de la pornire, in caz contrar va trebui sa reporniti alarma.

2. Daca doriti sa schimbati modul de alarma curent cu altul, va rugam sa comutati modul de alarma in 5 secunde, altfel va trebui sa reporniti alarma.

3. Utilizati comutatorul de selectare melodie (3) pentru a selecta melodia care va place. Rotiti comutatorul de volum (4) pentru a controla volumul sunetului.

4. Pentru modul alarma cu lumina, exista patru LED-uri de pe alarma care afiseaza cicluri repetate de licarire succesiva a LED-urilor.

5. Daca scutecul/lenjeria uda/a nu este schimbat/a intr-un timp destul de lung, alarma va iesi din modul de alarma curent si se va inlocui automat doar cu modul licarire indicator luminos (10) intermitent. Daca vedeti indicatorul cu lumina intermitenta, va rugam sa schimbati scutecul/lenjeria .

IV. Principalele specificatii tehnice:

1. Putere de operare: 2 baterii AAA;
2. Temperatura de operare: -20°C la 50°C
3. Umiditate operare: 5% - 95%.